

Huve-Check[®] Crypto

(1 X 10 testnih trakov)

Za odkrivanje kriptosporidioze



Kako izvesti test



1. Vzorec blata vzemite neposredno iz rektuma. Če so vzorci trdni, odstranite presežne količine z lopatico ali čistim predmetom. Če je vzorec tekoč, ga vzemite z žlico.



2. Razredčite vzorec s tekočino v steklenički za vzorce.



3. Dobro homogenizirajte, pri čemer pazite, da preprečite nastanek pene.

Huve-Check[®]


Huve
Check[®]



4. Raztrgajte aluminijasto ovojnico na zarezih. Ko enkrat napravo vzamete iz ovojnice, je stabilnost naprave kratkotrajna, zlasti v vlažnem okolju.



5. Počakajte 10 minut, nato pa interpretirajte rezultate s pomočjo slike 6.

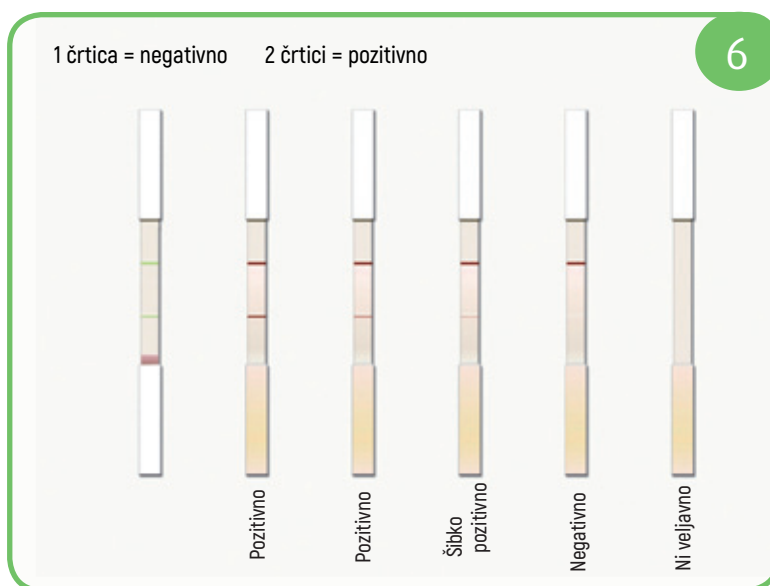

6. Rezultati po 10 minutah.

Previdnostni ukrepi za uporabo

- Testne komplete shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi.
- Med izvajanjem testa nosite rokavice.
- Analizirani vzorec ne sme biti preveč koncentriran. Ne pripravljajte vzorca, ki je večji od žličke.
- Napravo odstranite v skladu z zakonodajo o varstvu okolja in ravnanju z biološkimi odpadki.

 **ANIMALIS**

Zastopa in prodaja:

Animalis, prehrana in zdravje živali, d.o.o.

Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana

t. 01 242 55 30 | f. 01 292 65 31 info@animalis.si | www.animalis.si MODRA ŠTEVILKA 080 35 03

 **HUVEPHARMA®**

HUVEPHARMA EOOD • 3^a NIKOLAY HAYTOV STR • 1113 SOFIA • **BULGARIA** • P +359 2 862 5331 • F +359 2 862 5334 • SALES@HUVEPHARMA.COM
 HUVEPHARMA N.V. • UITBREIDINGSTRAAT 80 • 2600 ANTWERP • **BELGIUM** • P +32 3 288 1849 • F +32 3 289 7845 • CUSTOMERSERVICE@HUVEPHARMA.COM

HUVE Check®